

Diabète

et autosurveillance glycémique

Dinno  Santé

Voir le diabète autrement



Comment...

effectuer son test de glycémie ?

Systeme d'autosurveillance glycémique Dinno Tandem :
lecteur CareSens® N et CareSens® N POP.

IMPORTANT

Le système d'autosurveillance glycémique est composé d'un lecteur de glycémie, d'un stylo autopiqueur, de lancettes et de bandelettes.

Le lecteur mesure le niveau de glucose dans le sang. Il doit être utilisé seulement pour des tests à l'extérieur du corps, et fonctionne uniquement avec les bandelettes CareSens® N.

La bandelette est à usage unique, uniquement avec du sang capillaire frais (sang non veineux). Veuillez bien vérifier la date limite d'utilisation des bandelettes.

Le stylo autopiqueur doit être utilisé par une seule personne ; la lancette neuve et stérile qu'une seule fois.

Lecteur CareSens[®] N

Port de transmission


Utilisé pour le transfert de données entre le lecteur et un ordinateur, à l'aide d'un câble CareSens[®].

Bouton ↑

Sélectionne ou change les informations.

Bouton S

Allume et éteint le lecteur et confirme les sélections dans le menu.

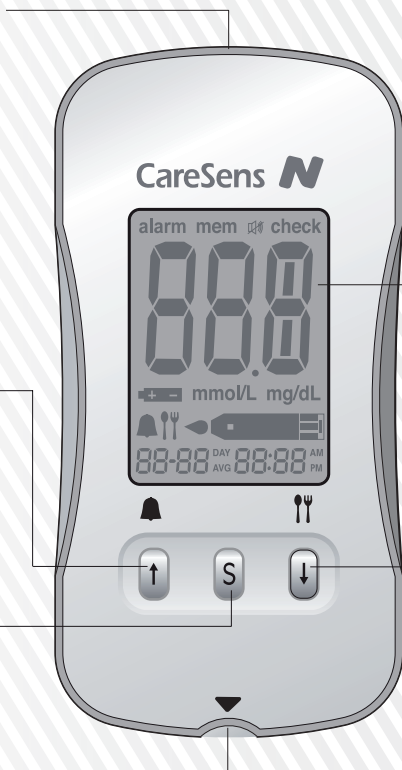

Ecran

Affiche les résultats, les messages.


Bouton ↓

Sélectionne ou change les informations.


Port d'entrée de la bandelette

Insérez les bandelettes ici.


Le stylo autopiqueur

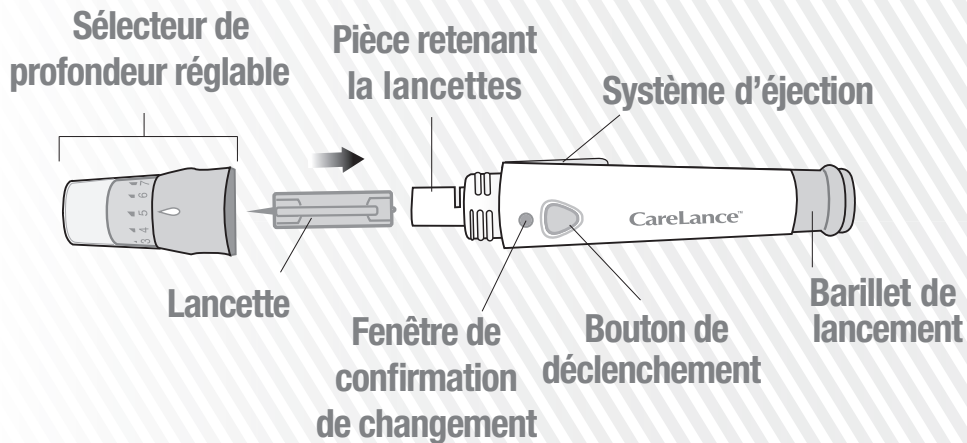


Utilisation du stylo autopiqueur

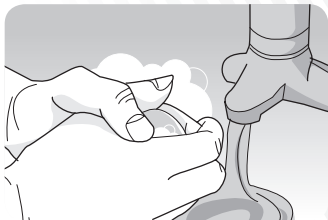


Lavez méticuleusement vos mains ainsi que le site qui va servir au prélèvement de l'échantillon sanguin, avec de l'eau tiède savonneuse.
Rincez et séchez

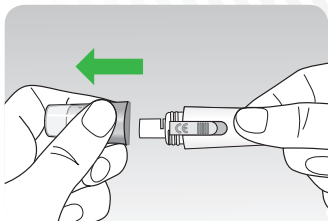

Dévissez et enlevez le sélecteur réglable.

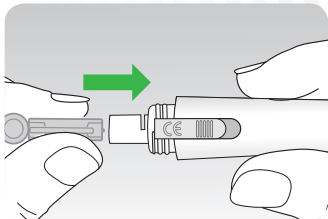


Insérez fermement une nouvelle lancette dans l'emplacement prévu. Tenez bien la lancette.


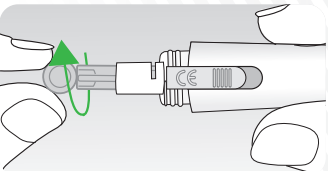


Tournez doucement pour enlever le disque protecteur.
Conservez le disque pour y replanter la lancette après usage.
Remettez en place le sélecteur réglable.

Utilisation du stylo autopiqueur

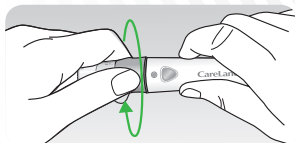

Remplacez et tournez le sélecteur réglable pour fermer.

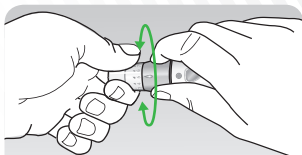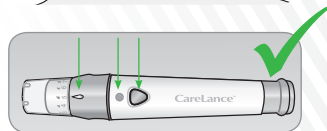


Sélectionnez la profondeur souhaitée allant de 1 à 7 sur le sélecteur réglable.

Faites tourner la bague pour aligner la valeur voulue en face de la flèche.



1 = profondeur de pénétration la plus faible.

7 = profondeur de pénétration la plus élevée.

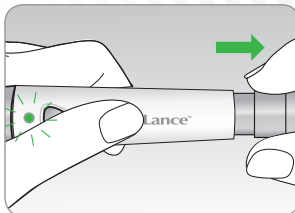

Pour armer le stylo autopiqueur, tenez le sélecteur avec une main. Tirez sur le barillet de lancement avec l'autre main. Le stylo autopiqueur est armé quand vous entendez un clic et que la fenêtre de confirmation de chargement devient rouge.

Utilisation de la bandelette



Pistes de contact

Insertion de la bandelette, les pistes de contact vers le haut, dans le port d'entrée du lecteur.

Fenêtre de mesure

Vérifier à cet endroit si l'échantillon de sang appliqué est suffisant ou non.



Assez
de sang


Pas assez
de sang

Si la fenêtre de mesure n'est pas remplie à temps, le message « Er4 » apparaîtra.

Bord sur lequel appliquer
l'échantillon de sang




Utilisation de la bandelette

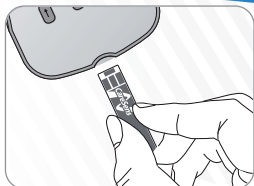


Poussez doucement la bandelette à l'intérieur jusqu'à l'émission d'un bip par le lecteur.

Le symbole «  » va apparaître sur l'écran.

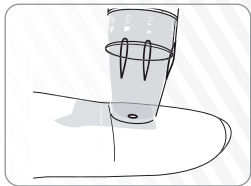

Prélevez un échantillon de sang à l'aide du stylo autopiqueur. Piquez les faces latérales des doigts en respectant le pouce et l'index. Appuyez sur le bouton de déclenchement. Enlevez le stylo du doigt. Attendez quelques secondes pour qu'une goutte de sang se forme.

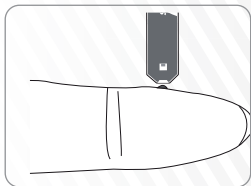


Un volume minimum de 0,5 µl est nécessaire pour remplir la fenêtre de mesure.

Après l'affichage de «  » appliquez la goutte de sang sur le bord étroit de la bandelette jusqu'au bip.




Le résultat du test apparaît à la fin du compte à rebours de 5 secondes. Le résultat est automatiquement stocké dans la mémoire du lecteur.


Ejection de la lancette

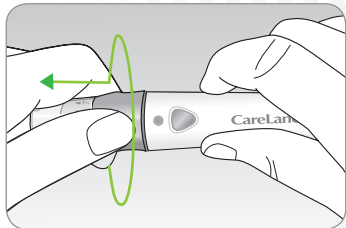

Dévissez le sélecteur réglable.

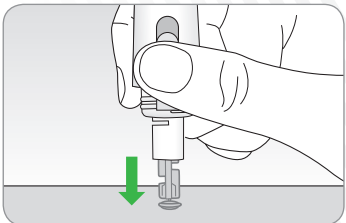

Placez le capuchon de protection sur la lancette. Poussez en avant l'éjecteur de lancette avec le pouce et retirez simultanément le barillet coulissant pour vous défaire de la lancette usagée dans des containers appropriés.

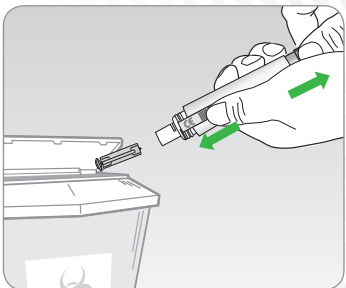


Lecteur CareSens® N Pop

Bouton S

Allume et éteint le lecteur et confirme les sélections dans le menu.

Ecran

Affiche les résultats, les messages.

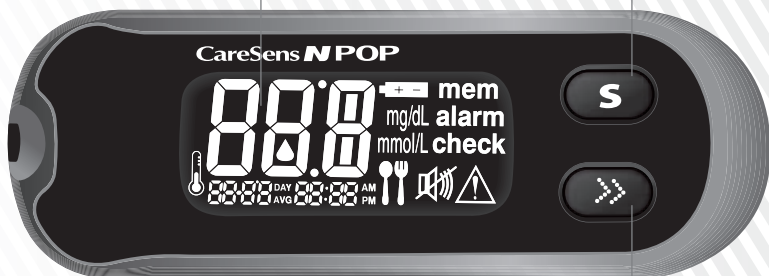

Port d'entrée de la bandelette

Insérez les bandelettes ici.


Bouton >>

Sélectionne ou change les informations.

Port de transmission

Utilisé pour le transfert de données entre le lecteur et un ordinateur, à l'aide du câble CareSens®.

Utilisation de la bandelette

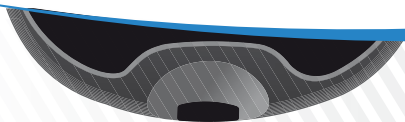

Pistes de contact

Insertion de la bandelette, les pistes de contact vers le haut, dans le port d'entrée du lecteur.

Fenêtre de mesure

Vérifiez à cet endroit si l'échantillon de sang appliqué est suffisant ou non.



Assez
de sang




Pas assez
de sang

Si la fenêtre de mesure n'est pas remplie à temps, le message « Er4 » apparaîtra.

**Bord sur lequel appliquer
l'échantillon de sang**

Utilisation de la bandelette

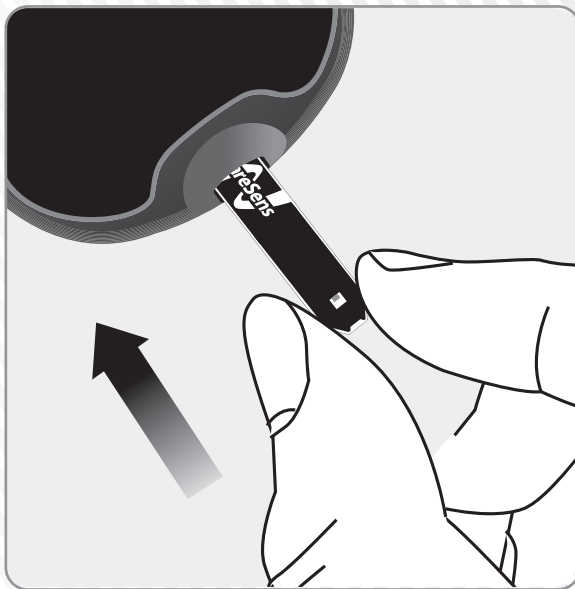


Poussez doucement la bandelette à l'intérieur jusqu'à l'émission d'un bip par le lecteur.


Faites attention à ne pas plier la bandelette.

Le symbole « ▲ » va apparaître sur l'écran.

Utilisation de la bandelette

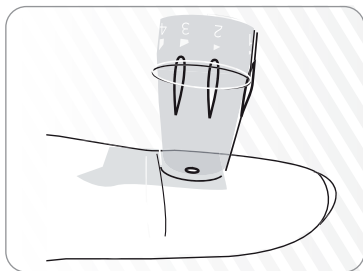


Pour l'usage du stylo autopiqueur, reprenez les explications décrites avec le lecteur CareSens® N. Prélevez un échantillon de sang à l'aide du stylo autopiqueur. Piquez les faces latérales des doigts en respectant le pouce et l'index, formez une goutte de sang.

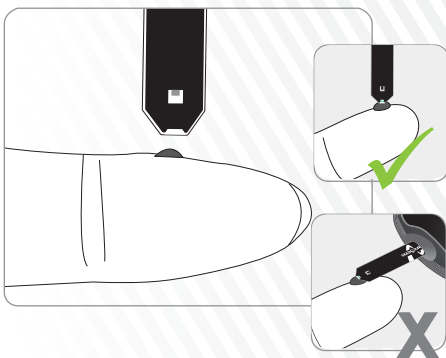

Un volume minimum de 0,5 µl est nécessaire pour remplir la fenêtre de mesure.

Appliquez la goutte de sang sur le bord étroit de la bandelette jusqu'au bip.

Après l'affichage de « ▲ », appliquez la goutte de sang sur le bord étroit de la bandelette jusqu'au bip.

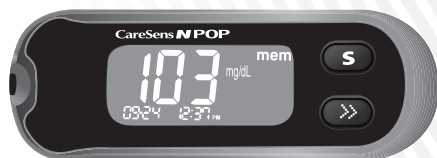

Le résultat du test apparaît après la fin du compte à rebours de 5 secondes. Le résultat est automatiquement stocké dans la mémoire du lecteur. Reportez-vous à la notice du CareSens® N pour l'éjection de la lancette.



➔ N° Vert 0 800 697 598

1, Rue Raoul Follereau - Bussy-Saint-Georges
 77608 Marne-La-Vallée CEDEX 3
 Tél. : +33 (0)1 64 77 30 00
 Fax : +33 (0)1 64 77 48 10

info@dinnosante.fr

www.dinnosante.fr



Dinno Santé est une activité d'Air Liquide Healthcare.